



Il Tocco Morbido della Luce

IntimaLase™


Trattamento laser per il ripristino funzionale della vagina

- Trattamento laser per il ripristino funzionale della vagina
- Soluzione per la sindrome del rilassamento vaginale
- Trattamento senza incisioni e minimamente invasivo
- Non è necessaria alcuna anestesia
- Trattamento sicuro ,ambulatoriale , veloce
- Elevato tasso di successo e di soddisfazione della paziente





Sindrome del rilassamento vaginale

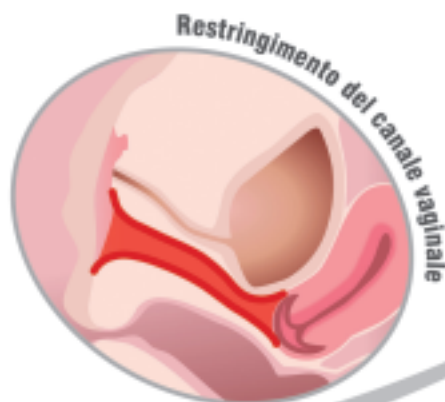

Restringimento del canale vaginale

Trattamento IntimaLase™

Che cosa è IntimaLase™?

IntimaLase™ è una terapia laser Er:YAG brevettata, innovativa e non invasiva. Si basa sul trattamento foto-termico, privo di incisioni e non ablativo che ripristina il canale vaginale.

Studi clinici preliminari dimostrano che è una procedura efficace, veloce e sicura. L'indicazione al trattamento IntimaLase™ è la sindrome del rilassamento vaginale, ovvero la perdita della forma strutturale ottimale della vagina. Questo processo è generalmente associato alla sovrastimolazione del canale vaginale dovuta alla gestazione così come all'avanzare dell'età.

Come funziona IntimaLase™?

Il trattamento IntimaLase™ si basa sull'effetto termico indotto nel tessuto vaginale tramite la luce laser che stimola il rimodellamento del collagene e la sintesi di nuove fibre di collagene. Il risultato finale della neocollagenesi e della sua riattivazione è il ripristino del canale vaginale.

La luce laser utilizzata nei trials clinici del trattamento IntimaLase™ è di tipo Er:YAG, con una lunghezza d'onda di 2940 nm. Essa viene utilizzata tramite una speciale tecnologia proprietaria che la consegna in dosi controllate al tessuto della mucosa vaginale ed alla fascia endopelvica ricca di collagene.

Gli straordinari vantaggi di IncontiLase™ per le tue pazienti

Per la maggior parte delle pazienti considerate nello studio, una singola seduta è stata sufficiente per un significativo ripristino del canale vaginale. Quando necessario, il trattamento è stato ripetuto dopo un mese.

Non sono necessarie speciali preparazioni pre trattamento o precauzioni post trattamento. Le pazienti possono tornare immediatamente alle loro normali attività quotidiane.

Dopo un singolo trattamento i risultati clinici hanno mostrato un ripristino del canale vaginale, una maggiore soddisfazione sessuale ed un significativo miglioramento nella qualità della vita delle pazienti.

Promettenti risultati clinici


Gli ultimi risultati scientifici presentati da Dr. Rivera e Dr. Fistonc mostrano chiaramente evidenti miglioramenti per quanto riguarda il serraggio vaginale ed il piacere sessuale. Le valutazioni sull'efficacia del trattamento

al 28%, con una media di ritrazione del 17%. Le misurazioni della gratificazione sessuale effettuate con il McCoy Female Sexuality Questionnaire (MFSQ) hanno mostrato in media un miglioramento di 8,5 punti su 36 punti della scala.

I risultati clinici provano come il pratico, veloce, privo di incisioni e non invasivo trattamento IntimaLase™ sia una procedura priva di effetti collaterali indesiderati e controindicazioni per la paziente.

Iniziare con IntimaLase™

Il training di formazione sarà fornito da Santec Academy (www.santecsr.it). Santec Academy fornirà le basi teoriche e la

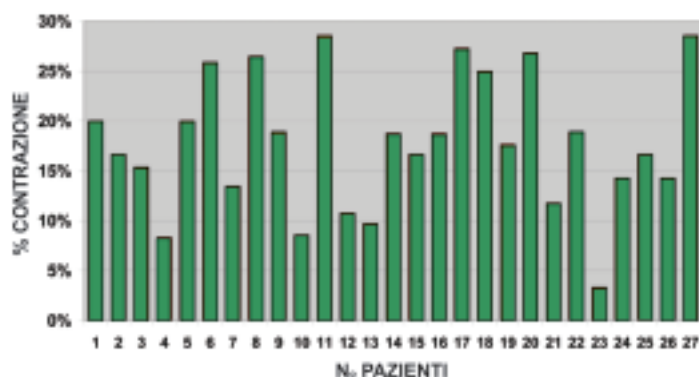

Restringimento del canale vaginale dopo un singolo trattamento IntimaLase™, misurato su 27 donne (Dr. Mario Rivera, GynDermolaser Clinic, Santa Cruz, Bolivia).

IntimaLase™ sono basate su questionari standardizzati che raccolgono le valutazioni soggettive delle pazienti e su misurazioni oggettive della ritrazione del tessuto del canale vaginale.

Il serraggio vaginale è stato osservato in tutte le pazienti, in un range che va dal 3%

formazione pratica per poter conoscere e quindi utilizzare nella pratica clinica i principi fisici e le interazioni con i tessuti del sistema laser Er:YAG. In un workshop dedicato all'utilizzo del laser Er:YAG i partecipanti saranno coinvolti in lezioni frontali essenziali e dimostrazioni pratiche.



SANTEC

Sede legale: Via A. Tassoni, 16/4 - 42100 Reggio Emilia
Sede operativa: Via Leonardo da Vinci, 4/11 - 57123 Livorno
Tel. 0586 444539
www.santecsr.it E-mail info@santecsr.it