




# Il Tocco Morbido della Luce

## RenovaLase™

### Trattamento laser per l'atrofia vaginale

- Soluzione per i sintomi dell'atrofia vaginale
- Trattamento foto-termico del canale vaginale
- Ripristino funzionale della vagina
- Trattamento senza incisioni e minimamente invasivo
- Non è necessaria alcuna anestesia
- Trattamento sicuro, ambulatoriale, veloce
- Elevato tasso di successo e di soddisfazione della paziente



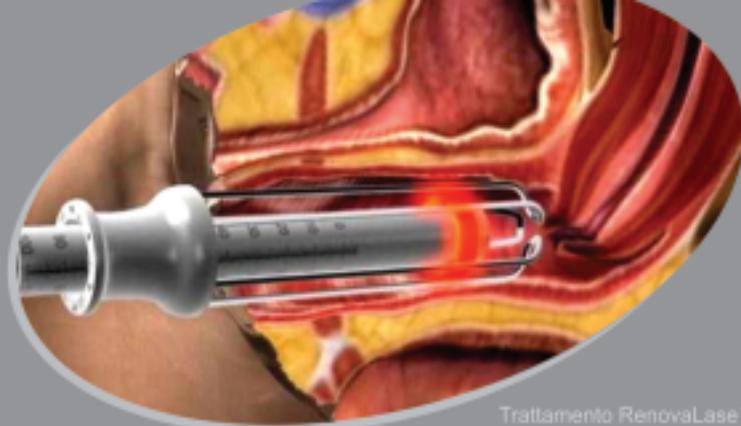

Tattamento RenovaLase™

Il calo del livello di estrogeni dopo la menopausa (naturale o indotta) può causare la comparsa di atrofia vaginale con secchezza, prurito, irritazione e dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia). Questi sintomi insorgono progressivamente e tendono a peggiorare con il tempo, con un impatto negativo sulla vita sessuale della donna e della coppia.

## Che cosa è RenovaLase™?

RenovaLase™ è una terapia laser 2940 nm Er:YAG non invasiva, unica ed innovativa, per i sintomi dell'atrofia vaginale. Si basa su un trattamento foto-termico non ablativo del canale vaginale.

Studi clinici dimostrano che questa è una procedura efficace, priva di effetti collaterali, veloce e sicura.

## Promettenti risultati clinici

I risultati degli studi condotti mostrano cambiamenti favorevoli nel trofismo della mucosa vaginale, con aumento di collagene e vascolarizzazione, così come dei livelli di glicogeno e di ispessimento epiteliale.

Conseguentemente le donne hanno riportato un miglioramento significativo dei sintomi dell'atrofia vaginale e della dispareunia per almeno 6 mesi dopo il trattamento Laser.

L' applicazione del Laser Er:YAG non provoca ablazione tissutale.

RenovaLase™ è indicato anche per le donne che non vogliono assumere ormoni o che realmente presentano controindicazione assoluta all'uso di terapia ormonale,

anche locale ed a basso dosaggio, come le donne che hanno sofferto di tumori ormono-dipendenti (cancro endometriale, cancro della mammella).

## Come funziona RenovaLase™?


Il trattamento RenovaLase™ si basa sugli effetti termici laser-indotti sul tessuto vaginale, stimolando la vascolarizzazione vaginale e la neo produzione di collagene, senza danni termici o ablativi.

Di conseguenza si ha un vero ripristino funzionale della mucosa vaginale, che si presenta maggiormente vascolarizzata, con


riduzione dei sintomi di secchezza, prurito, irritazione e dispareunia.

## Iniziare con RenovaLase™

Il training di formazione sarà fornito da Santec Academy ([www.santecsrl.it](http://www.santecsrl.it)). Santec Academy fornirà le basi teoriche e la formazione pratica per poter conoscere e quindi utilizzare nella pratica clinica i principi fisici e le interazioni con i tessuti del sistema laser Er:YAG. In un workshop dedicato all'utilizzo del laser Er:YAG i partecipanti saranno coinvolti in lezioni frontali essenziali e dimostrazioni pratiche.

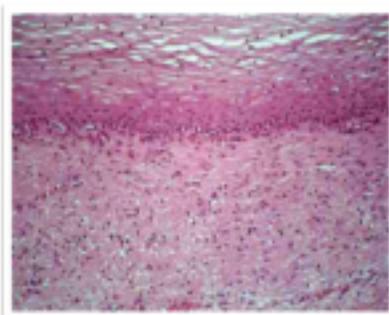

Mucosa vaginale atrofica

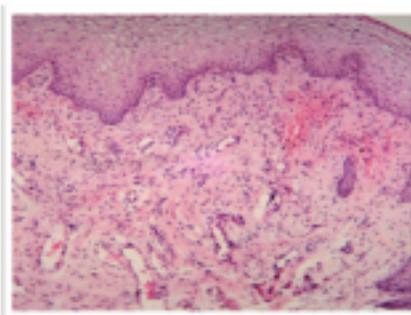

Mucosa vaginale dopo il trattamento RenovaLase™: ispessimento epiteliale con aumento della vascolarizzazione, e del contenuto di collagene e di glicogeno.

Copyright Dr. Gaspar



**SANTEC**

Sede legale: Via A. Tassoni, 16/4 - 42100 Reggio Emilia  
Sede operativa: Via Leonardo da Vinci, 4/11 - 57123 Livorno  
Tel. 0586 444539  
[www.santecsrl.it](http://www.santecsrl.it) E-mail [info@santecsrl.it](mailto:info@santecsrl.it)